



SISTEMA CERRADO PARA LA **EXTRACCIÓN Y OBTENCIÓN DE PRP**

El KIT OLIN-1 es un producto estéril de un solo uso.



www.olin-1.com

KITPRP

Introducción

El **plasma rico en plaquetas (PRP)** es un compuesto líquido de plasma y plaquetas del mismo paciente.

Las plaquetas contienen grandes dosis de proteínas bioactivas conocidas como factores de crecimiento, promotoras de la reparación y regeneración de tejidos de una manera natural.



Procedimiento


Para la preparación del **PRP**, el proceso empieza por la extracción de 20 a 40 ml. de sangre. La sangre es centrifugada mediante un equipo especial para separar los componentes: hematíes, leucocitos, plasma pobre en plaquetas (**PPP**) y plasma rico en plaquetas (**PRP**).

Una vez obtenido el **PRP**, el especialista lo aplica en la herida, lesión, rotura, etc.


Debido a las diferentes respuestas en los pacientes, el número de aplicaciones puede variar entre 3 a 5 sesiones.



1. Extracción de sangre

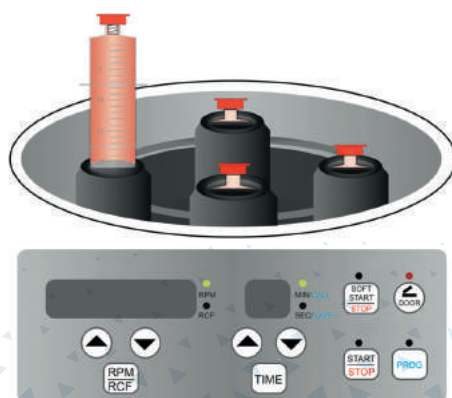

2. Centrifugado

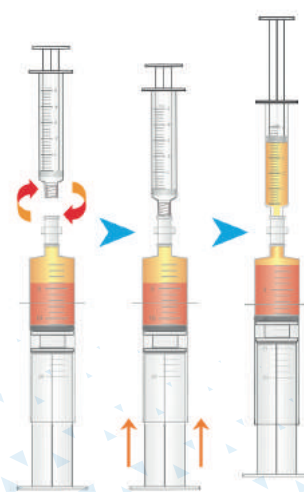


3. Separación componentes

Beneficios

El procedimiento de PRP acelera el tiempo de recuperación ayudando a reducir el dolor y a mejorar las propiedades del tejido lesionado.

- › No genera rechazo ni contagio de ningún tipo
- › Es de fácil obtención sin producir prácticamente ninguna molestia
- › Es un tratamiento de efectivo coste/beneficio
- › Resultados rápidos con beneficios a largo plazo
- › Reducción de costes sanitarios

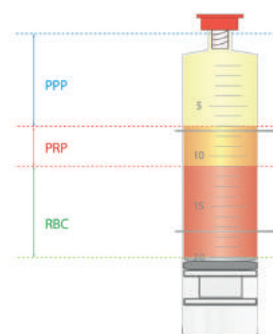

Características

El **Kit Olin-1** es un producto sanitario estéril de un solo uso creado tanto en formato de 20 ml. como de 40 ml. (2x20 ml.).

La extracción, el centrifugado y la obtención de las diferentes fracciones sanguíneas se realizan en el mismo dispositivo.



Contenido de la caja de 20 ml.

Ventajas del KITPRP

- › No hay traspaso de la sangre extraída al dispositivo mediante agujas, transfers, etc. evitando así posibles infecciones y/o roturas de hematíes
- › Permite al especialista controlar la cantidad de PRP a utilizar
- › Facilita la separación del plasma pobre en plaquetas (PPP) para su uso tópico





enelini®

ENELINI ASSOCIATS, S.L.U.

C/ Llull 88, local 2
08005 Barcelona
Tel. +34 931 620 357
info@enelini.com
www.enelini.com



Todo el contenido de este catálogo, así como la información, textos, imágenes, diseño gráfico, contenidos creativos y estéticos son una obra cuya propiedad intelectual pertenecen a sus autores y está protegido por los derechos de ©Copyright y propiedad intelectual. Los dispositivos y productos están protegidos por la Ley de Patentes Española, Patente Europea y la legislación internacional en relación con los registros indicados: U2011100047/5-ES, EP12736680.5, PCT/ES2012/000005.